

Produktinformation

Mundbind type II, 3-lags, non-steril – godkendt til medicinsk brug

Bestillingsnummer: R-0050

Mundbindet er fremstillet med 3-lags non-woven materiale, hvilket minimerer transport af bakterier og partikler.

Mundbindet er let at tage på ved hjælp af elastiske øretråde og er forsynet med en integreret, individuel justerbar næseklemme.

Påsatning:

Mundbindet anbringes over munden og næsen og fastgøres bag ørerne med de to elastiske løkker.

Den justerbare næseklemme justeres til næsens konturer og kinder med blidt pres.

Brugervejledning findes på emballagen.

Bemærk!

Da mundbindet fugtes af den luft, vi indånder, anbefales det at udskifte mundbindet efter to - senest tre timers brug.

Bortskaffelse:

Mundbindet er et engangsprodukt og kan bortskaffes sammen med almindeligt restaffald til dagrenovation.

OBS!

Specifikke nationale regler skal altid overholdes.

Produktdetaljer:

3-lags mundbind non-woven

Elastiske øresløjfer, latexfri

Integreret og justerbar næseklemme

Behagelig at bære

Farve: Hvid

Filterkapacitet > 98%

Størrelse: ca. 17,5 x 9,5 cm

Emballageenhed: 50 stk. pr. pose

Ikke-steril til engangsbrug

CE godkendt

Testet efter standarden: (DS/EN) 14683:2019)



Instructions for use:

- Wash hands thoroughly before putting on the mask.
- Change the mask after 2 to 3 hours.
- Dispose of the used mask with your residual waste (closed waste bin) and wash your hands thoroughly after disposal.
- Please observe country-specific regulations!



1. Prepare the mask for application.
2. Adjust the nose clip.
3. Fix the ear loops behind the ears.
4. The mask must surround mouth, chin and nose completely.

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany



Brug af Mundbind



1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit
2. Elastikken er fæstet på bagsiden af mundbindet
3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørerne.
4. Juster næseclipsen, sørg for at det sidder helt tæt til dit ansigt.
5. Rør ikke mundbindet under brug, skift det ofte og altid hvis det er vådt eller beskidt.
6. Når det skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet, smid det ud med det samme.
7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit

Sterilean

Mundbind type II
BFE: > 98%
(DS/EN 14683:2019)